

ToeOFF COMBO®

Art. No. 28780 & 28781



Fabriquez un KAFO personnalisé en moins d'une heure !

Solution orthétique profil bas et fonctionnelle pour la gestion du genu recurvatum combiné avec le pied-tombant.

ToeOFF® s'est avéré au fil des ans être une orthèse efficace pour la rééducation de la marche pour la gestion du pied tombant et de l'instabilité de la cheville. Il a aidé des centaines de milliers de personnes à travers le monde à marcher avec un schéma de marche plus proche de la normale, souvent en étant capables de reprendre des activités qui améliorent considérablement la qualité de vie. Souvent, le pied tombant est accompagné de genu recurvatum. Combo est genouillère amovible et légère pour ToeOFF® (ou BlueRocker™) qui crée une solution orthétique innovante pour la gestion du pied tombant combiné avec le genu recurvatum.

- Montants facilement façonnés et ajustés à la hauteur optimale pour le patient
- Les composants modulaires permettent de s'adapter aux variations de la circonférence des cuisses et des mollets
- Profil bas
- Léger
- Facile à mettre et à enlever enfiler et à retirer
- Facile à enlever lorsque l'utilisateur se détend (en regardant la télévision, etc.)

Lors du traitement de patients souffrant de différents types de troubles nerveux et musculaires tels que l'AVC, le post-polio et la CMT, on observe souvent des déficits résiduels comme le pied tombant. À mesure que les muscles s'affaiblissent, d'autres problèmes peuvent survenir. L'un de ceux-ci peut être le genu recurvatum. La malposition, une laxité excessive, l'instabilité et le raccourcissement musculaire peuvent augmenter le stress et la surcharge qui peuvent se transformer en douleur. À plus long terme, la vitesse de marche et la longueur des pas peuvent être affectées, et l'asymétrie peut causer d'autres blessures au corps.



Le Combo est adapté individuellement à chaque patient. Les différents composants peuvent être combinés pour s'adapter à la taille et à la longueur du patient.

- La taille du manchon de cuisse est déterminée en fonction de sa hauteur sur la cuisse. Cependant, il ne peut pas être placé à moins de 10 cm (4 pouces) du plateau tibial.
- La taille du connecteur tibial est déterminée par la taille du ToeOFF ou du BlueRocker.
- La taille du réglage de l'hyperextension est déterminée par la largeur du genou (M-L).
- Les 5 codes de produits doivent être commandés pour une orthèse complète.
- Le combo ne peut pas être utilisé pour les patients de plus de 150 kg et de 2 mètres.

Item	Description	Taille	G/D	Circonférence*	M-L**
28780 0000	Articulations avec Montants	Universel			
28781 1011	Manchette de Cuisse	Petit	Gauge	30 - 40 cm	11 - 15 cm
28781 1012	Manchette de Cuisse	Moyen	Gauge	38 - 50 cm	13 - 15 cm
28781 1013	Manchette de Cuisse	Grand	Gauge	48 - 60 cm	15 - 19 cm
28781 1014	Manchette de Cuisse	T-Grand	Gauge	58 - 70 cm	17 - 21 cm
28781 2011	Manchette de Cuisse	Petit	Droit	30 - 40 cm	11 - 15 cm
28781 2012	Manchette de Cuisse	Moyen	Droit	38 - 50 cm	13 - 15 cm
28781 2013	Manchette de Cuisse	Grand	Droit	48 - 60 cm	15 - 19 cm
28781 2014	Manchette de Cuisse	T-Grand	Droit	58 - 70 cm	17 - 21 cm
28782 0011	Ajustement de l'Hyperextension	Petit			70 - 105 mm**
28782 0012	Ajustement de l'Hyperextension	Moyen			95 - 130 mm**
28782 0013	Ajustement de l'Hyperextension	Grand			125 - 160 mm**
28783 0011	SoftKIT pour 28781 jeux de 2	Petit			
28783 0012	SoftKIT pour 28781 jeux de 2	Moyen			
28783 0013	SoftKIT pour 28781 jeux de 2	Grand			
28783 0014	SoftKIT pour 28781 jeux de 2	T-Grand			
28784 0011	Connecteur de Tibia	Petit			
28784 0012	Connecteur de Tibia	Moyen			
28784 0013	Connecteur de Tibia	Grand			

▶ Choisissez la taille identique à ToeOFF/BlueRocker

*20 cm au-dessus de la mi-patella **largeur du genou

allard

Allard International

Karbingatan 38, 254 67 Helsingborg, Sweden | +46 42 25 27 00 | info@allardint.com | allardint.com